

TEST DI DISEQUILIBRIO LATERALE**EVIDENZIA:****A** ASSENZA DI ALCUNI SCHEMI MOTORI**B** PREFERENZA AD UTILIZZARE PRINCIPALMENTE UN LATO

- La masticazione avviene con maggiore difficoltà da un lato
- La difficoltà può essere accentuata dallo spessore posizionato in avanti o dietro



- Lo spessore maggiore posizionato in avanti stimola il muscolo temporale e quindi lo spostamento dallo stesso lato della mandibola durante la masticazione
- Il mancato spostamento della mandibola indica la perdita del movimento da quel lato



Quando si chiede al paziente di spostare la mandibola a destra e sinistra per il controllo delle guide canine e in protrusiva per la guida incisiva, si può rilevare una certa difficoltà in uno o più movimenti. Questa difficoltà può essere correlata all'abitudine a muovere la mandibola solo in una direzione e non nell'altra (es.: mastica solo da un lato).

Alifix permette di indagare la reale libertà di azione della muscolatura e, effettuando il test, di escludere il contatto dentale.

COME INTERVENIRE

La correzione dell'abitudine a lavorare solo da un lato, viene effettuata facendo masticare Alifix dal lato opposto con lo spessore maggiore del cuneo in avanti in modo da stimolare il Temporale Anteriore e portare omolateralmente la mandibola.

